

Aspiratore VC 45 - con esatto picco di potenza per l'implantologia



ARIA COMPRESSA
ASPIRAZIONE
SISTEMI IMMAGINE
CONSERVATIVA
IGIENE

Ideale per il sangue, i residui di dentina e di osso

Potente e silenzioso

Durante l'intervento chirurgico, tutta la concentrazione è rivolta al paziente. Il team deve potersi affidare a sistemi ad alta potenza che garantiscano di operare senza difficoltà, come l'unità di aspirazione chirurgica VC 45 a regolazione variabile, che riesce a soddisfare ogni necessità in ambito chirurgico, grazie ad un volume di aspirazione di 45 l/min. ed alla costante elevata depressione di max. 910 mbar.



Presca del contenitore secreti



Depressione massima sino a 910 mbar

Depressione massima per la chirurgia

Oltre a rimuovere la saliva ed i secreti dalla bocca del paziente, i sistemi di aspirazione svolgono una funzione importantissima: aspirare l'aerosol contaminato dall'intera zona operativa. Per fare ciò, sono richieste un'elevata quantità di aspirazione di circa 300 l/min. ed una bassa depressione di max. 160 mbar.

Diverso è nella chirurgia orale e maxillo-facciale, dove occorre rimuovere con precisione elevati quantitativi di sangue, residui di tessuto, di dentina ed osso, con la cannula chirurgica; questa operazione richiede una depressione elevata. Inoltre, la separazione delle sostanze sopra menzionate non deve causare problemi. L'aspiratore VC 45 adempie con precisione alle esigenze di un funzionamento continuo senza disturbi durante l'operazione, grazie alla potente e robusta pompa a membrana ed al sistema di recipienti.

Ciò che conta:

- Depressione costante con protezione da sovraspirazione
- Potenza ed assorbimento adatti ad ogni operazione di chirurgia dentale
- Operatività ergonomica continua, grazie al sistema di filtraggio, di separazione e di sgancio, adatto alla sala operatoria
- Semplice sostituzione dei contenitori, grazie al sistema di attacco rapido tra vaso e sistema di aspirazione
- Struttura insonorizzante per la pompa a membrana
- Smaltimento semplice ed igienico dei secreti

Tutto quello di cui necessita un valido sistema di aspirazione chirurgica



Vaso secreti multiuso da 1,5 l / 3 l

I vasi sono autoclavabili ed il loro materiale non presenta rischi di lesione. Per ridurre la formazione di schiuma, è installato un convogliatore para-spruzzi. In tal modo vi è una maggiore protezione contro l'aspirazione di liquidi ed aerosol tramite il sistema.



Vaso secreti monouso 2 l

Nessun contatto con i liquidi contaminati, vale a dire nessuna necessità di pulizia e disinfezione, quindi riduzione di manodopera e di costi.




Tubi di aspirazione multiuso

I tubi di aspirazione multiuso sono autoclavabili ed hanno una lunghezza di 2,1 m.



Tubi di aspirazione monouso

Tubi di aspirazione (con o senza cannula integrata) per un semplice utilizzo e smaltimento, lunghezza 2,1 m.

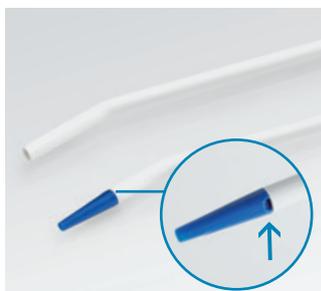

Cannule chirurgiche

Cannule sottili per interventi chirurgici, adatte ad aspirare elevati quantitativi di sangue, grazie al loro design. Disponibili in metallo o come cannule monouso.



Disinfezione e pulizia del sistema di aspirazione

In implantologia, il sistema di aspirazione è sottoposto ad elevate sollecitazioni: virus, batteri e funghi rappresentano una vera e propria minaccia per l'igiene; depositi di tartaro, materiali, sangue e saliva devono essere rimossi regolarmente. A tale scopo, la gamma Orotol® offre dei prodotti adatti alla disinfezione ed alla pulizia.

Dati tecnici VC 45

	VC 45
Tensione (V)	230 (1~)
Frequenza (Hz)	50/60
Potenza elettrica (kW)	0,138
Corrente assorbita (A)	0,6
Quantità di aria aspirata (l/min.)	45
Depressione (mbar)	910
Volume contenitore secreti (l)	1,5/3,0 2,0 monouso
Dimensioni senza carrello (H x L x P cm)	33 x 24 x 36
Dimensioni con carrello (H x L x P cm)	101 x 36 x 44
Peso senza carrello (kg)	6,7
Peso con carrello (kg)	12,5
Livello di rumorosità [dB(A)]	48



Sistema di aspirazione di prima classe

- Quantità di aria aspirata 45 l/min.
- Depressione regolabile sino a 910 mbar
- Potente, anche per elevati quantitativi di sangue
- Silenzioso
- Sistema ad attacco rapido igienico
- Manutenzione non richiesta, bassi costi operativi
- Tecnologia all'avanguardia
- Design moderno

VC 45 disponibile anche
con pedale di comando
(lunghezza del cavo 3 m)

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l.
Via Dell'Artigianato n. 8
20053 Muggiò (Mi)
Tel.: +39 039 59 70 30 0
Fax: +39 039 59 70 30 3

www.durr.it
info@durr.it



DÜRR
DENTAL