

DE/EN Filterwechsel / Filter change



**Filter jährlich wechseln.
Change filter every year.**

Filter	Best-Nr. / Order no.	Wechsel / Change
A	1630-121-00 oder/or 1640-982-00*	
B	1610-121-00 oder/or 1640-981-00*	

* Der Filter kann im Dampfsterilisator gereinigt werden, um seine Durchlässigkeit zu erhöhen (in Sterilgutverpackung, bei 134 °C, 2,16 bar Überdruck zur Umgebung, 5 min Haltezeit, mit anschließender Trocknung).

Der Filter produziert keine sterile Luft.


The filter can be cleaned in a steam sterilisor in order to increase its transmissibility (in sterile product packaging, at 134 °C, 2.16 bar gauge pressure above ambient environment, holding time 5 min, subsequently dried).

The filter doesn't produce sterile air.


Filter	Best-Nr. / Order no.	Wechsel / Change
D	0832-982-00	
E	1650-101-00	
F	5180-982-00	

Kompressor mit 1 Zylinder / Compressor with 1 cylinder

		Filter		
		B	D	E
Primo	5110-.. / 5120-.. / 5150-..		1	
Primo	5111-.. / 5121-.. / 5151-..	1	1	
Primo	5152-..	1	1	1

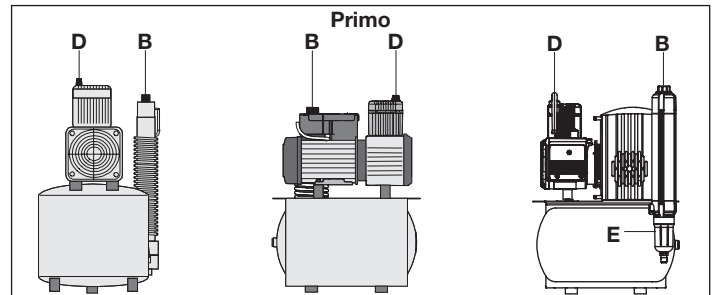


		Filter					
		B	C	D	E	F	
Tornado 1 Zyl.	5410-..			1			
Tornado 70	5430-.. / 5170-..		1				
Tornado 70	5431-.. / 5171-.. /	1	1				
Tornado 70	5172-..	1	1		1		
Tornado 1	5180-.. / 5182-..	1			1	1	
Mini Station	5331-..		1				

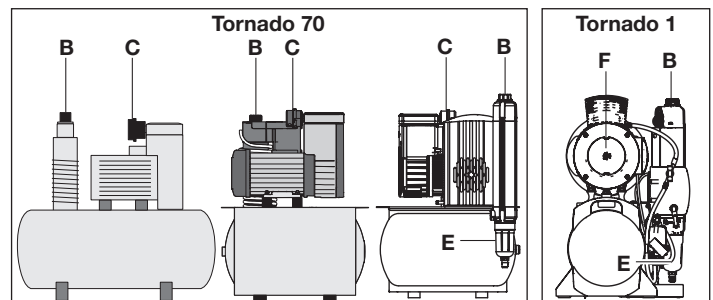

Kompressor mit 2 Zylinder / Compressor with 2 cylinders

		Filter		
		B	D	E
Duo	5210-.. / 5220-.. / 5250-..		2	
Duo	5211-.. / 5221-.. / 5251-..	1	2	
Duo	5252-..	1	2	1

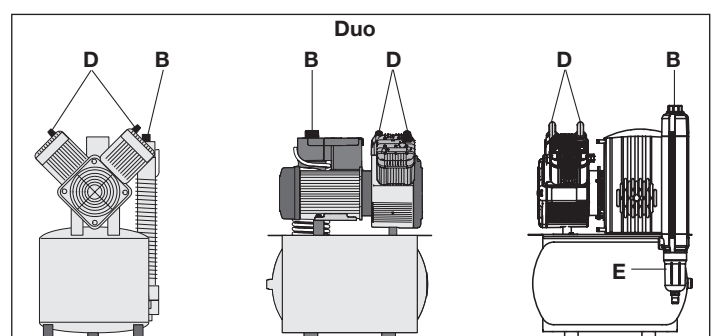

		Filter				
		B	C	D	E	F
Tornado 2 Zyl.	5510-..			2		
Tornado 130	5530-.. / 5270-..			2		
Tornado 130	5531-.. / 5271-..	1	2			
Tornado 130	5272-..	1	2		1	
Tornado 130 R	5231-..	1	2			
Tornado 2	5280-.. / 5282-..	1			1	1

Kompressor mit 3 Zylinder / Compressor with 3 cylinders

		Filter			
		B	C	D	E
Bulle	3610-..			3	
Bulle	3621-..			3	
Trio Silver Airline	5351-..	1		3	
Trio Silver Airline	5352-..	1		3	1

Kompressor mit 4 Zylinder / Compressor with 4 cylinders

		Filter		
		B	D	E
Duo Tandem	4120-..			2
Duo Tandem	4121-.. / 4321-.. / 4151-..	1	2	
Duo Tandem	4152-..	1	2	1
Duo Tandem	4220-..			4
Duo Tandem	4221-.. / 4251-..	1	4	
Duo Tandem	4252-..	1	4	1

		Filter				
		A	B	C	D	E
Quattro	5450-..				4	
Quattro	5451-..				4	
Quattro	5452-..				4	1
Praxis/Labor Tandem	4520-.. / 4720-..				3	
Praxis/Labor Tandem	4521-.. / 4721-..	1			3	
Praxis/Labor Tandem	4420-.. / 4620-..				6	
Praxis/Labor Tandem	4421-.. / 4621-..	1			6	

		Filter			
		B	C	D	E
Quattro Tandem	4641-..	1		4	
Quattro Tandem	4642-..	1		4	1
Quattro Tandem	4680-..			8	
Quattro Tandem	4681-..	2		8	
Quattro Tandem	4682-..	2		8	2
Power Tandem	0931-..	1		2	
Power Tandem	0930-..	1		4	
PT 110	0903-..	1		1	
PT 160	0913-.. / 0918-..	1		2	
PT 210	0923-..	1		2	
PT 210	0928-..	1		4	
PTS 105	0947-105/01, ../02, ../03	1	1		
PTS 195	0947-195/01, ../11, ../21	1	2		
PTS 195	0947-195/02, ../12, ../13	1	4		
PTS 195	0948-195/01, ../11, ../21, ../22	1	2		
PTS 195	0948-195/02, ../12, ../13	1	4		
PTS 200	0949-200/01, ../11, ../21, ../22	1		2	1*
PTS 200	0949-200/02, ../12, ../13	1		4	1*

* bei Ausführung mit Membran-Trocknungsanlage
at version with membran-dryer

