




Einen Anwendungsfilm finden Sie auf [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

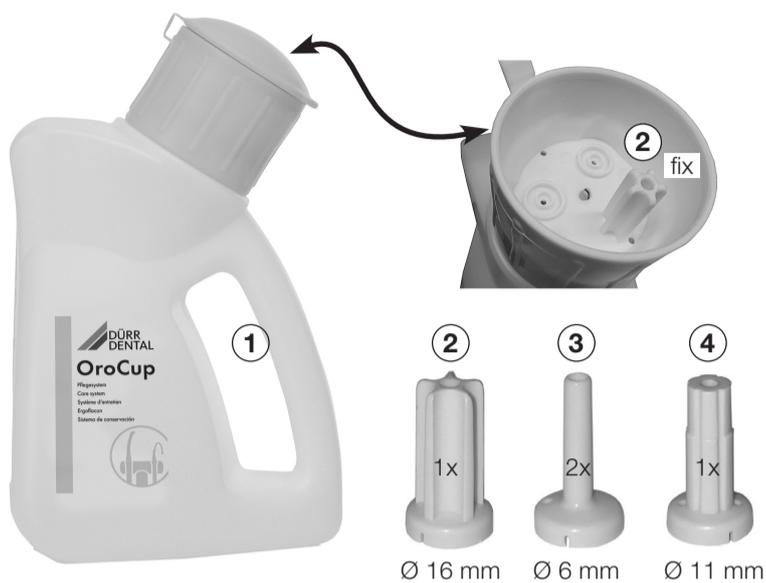

### Lieferumfang

- ① OroCup, Best.nr. 0780-350-00
- ② Einsatz Ø 16 mm (für großen Saugschlauch), 2x (1x lose, 1x fix)
- ③ Einsatz Ø 6 mm (für Speichelsauger), 2x
- ④ Einsatz Ø 11 mm (andere), 1x

### Verbrauchsmaterial

Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion ..... CDS110P6150  
flüssiges Konzentrat

Orotol® ultra Sauganlagen-Desinfektion ..... CDS120A6750  
pulverförmiges Konzentrat

MD 555 cleaner Spezialreiniger für Sauganlagen ..... CCS555C6150  
schaumfreies Konzentrat für zahnärztliche Sauganlagen und Abflussleitungen



Orotol® plus



Orotol® ultra



MD 555 cleaner

### Produktbeschreibung

Das OroCup Pflegesystem ist ein geschlossenes Dosiersystem zum einfachen Ansetzen und Absaugen von Sauganlagen-Desinfektion und Spezialreiniger. Mit Hilfe des OroCup kann das Saugsystem mit allen Komponenten und das Mundspülbecken gereinigt und desinfiziert werden.

Für 1 Behandlungseinheit wird 1 Liter Gebrauchslösung benötigt.

Der OroCup ist geeignet für handelsübliche Saugschläuche mit unterschiedlichen Durchmessern.

Im Deckel des OroCup befindet sich 1 fixierter Einsatz für Ø 16 mm. Zwei weitere Einsätze können je nach Durchmesser der Saugschläuche gewählt und eingesetzt werden.

Je nach Bedarf können 1 - 3 Saugschläuche gleichzeitig aufgesteckt werden, dabei haben ungenutzte Anschlüsse keinen Einfluss auf die Funktion.

### DÜRR DENTAL SE

Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

### GEBRAUCH

#### 1. Einsätze auswählen und aufstecken

- Einsatz entsprechend des Durchmessers des Saugschlauchs (z. B. Ø 16 mm für großen Saugschlauch, Ø 6 mm für Speichelsauger) auswählen und aufstecken, siehe Beispiel. Ungenutzte Anschlüsse haben keinen Einfluss auf die Funktion.


#### 2. Sauganlage reinigen und desinfizieren

Die Anwendung erfolgt nach Behandlungsende, bei höherer Belastung 2 x täglich (z. B. mittags und abends oder nach Bedarf).

- Persönliche Schutzausrüstung tragen.

##### 2.1 Vorreinigen mit Wasser

- 2 Liter Wasser absaugen.

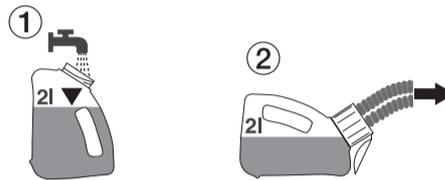


##### 2.2 Ansetzen im OroCup

- Je nach Bedarf 1 Liter oder 2 Liter Gebrauchslösung ansetzen. Herstellerangaben beachten.



- Deckel des OroCup schließen und OroCup schütteln.

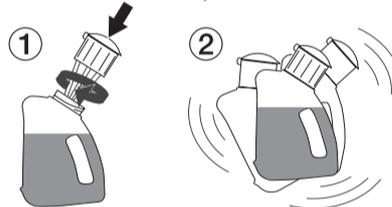


##### 2.3 OroCup positionieren und absaugen

- Deckel des OroCup öffnen.
- Desinfizierte Saughandstücke aufstecken und Gebrauchslösung absaugen.

Im OroCup können bis zu 2 Liter Gebrauchslösung angesetzt werden.

Den OroCup zum Absaugen der Gebrauchslösung wie folgt positionieren:

- Beim Absaugen des 1. Liters in senkrechte Position stellen (für die 1. Behandlungseinheit).
- Beim Absaugen des 2. Liters in waagrechte Position stellen (für die 2. Behandlungseinheit).

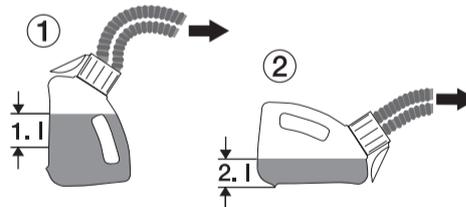

##### 2.4 Mundspülbecken reinigen und desinfizieren

- Pro Mundspülbecken mind. 250 ml Gebrauchslösung verwenden.



##### 2.5 Schlussspülen

- Nach Ablauf der Einwirkzeit 2 Liter Wasser absaugen, siehe 2.1 Vorreinigen mit Wasser.

