

# Information produit

## VistaScan Lingette de nettoyage pour écrans à mémoire



### VistaScan - aperçu rapide

- Lingette nettoyante pour films radiographiques particulièrement compatible avec les matériaux.
- Spécialement adaptée au film radiographique VistaScan.
- Préservation particulièrement bonne de la qualité grâce à une compatibilité avec les matériaux contrôlée.

### Propriétés

La lingette nettoyante pour films radiographiques VistaScan est particulièrement compatible avec la majorité des matériaux et spécialement conçue pour le nettoyage intensif du film de radiographie VistaScan.

### Composition du produit

La lingette nettoyante pour films radiographiques VistaScan contient 4 g de 2-propanol.

### Utilisation

Pour les films radiographiques VistaScan, utiliser exclusivement la lingette nettoyante spécifique aux films radiographiques VistaScan. Essuyer avec précaution le film radiographique à l'aide d'une lingette nettoyante et laisser sécher. Nettoyer uniquement les films radiographiques intacts.

### Comportement écologique

L'emballage est en matériau composite et peut être recyclé comme source thermique. Jeter les lingettes usagées avec les déchets ménagers. Ne pas jeter dans les toilettes.

Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité.

### Durée de conservation

4 ans

### Conditionnement

Boîte pliante de 10 lingettes

### Conservation

Conserver le produit dans un endroit aussi frais que possible, mais pas à moins de 5 °C.

### Remarques générales

Utilisation par du personnel spécialisé uniquement. Tout incident grave lié au produit doit être signalé immédiatement au fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre.

### Indications de danger

VistaScan lingette nettoyante pour films radiographiques est soumis à la classification et à la signalisation conformément au règlement CLP: voir l'étiquetage et la fiche de données de sécurité du produit.

### Rapports d'expertise indépendants et études propres

Les rapports d'expertise sont disponibles sur demande.

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des tests internes approfondis et des études scientifiques externes. Elles sont données au mieux de nos connaissances. Notre responsabilité en la matière est régie par nos « Conditions générales de vente et de livraison » disponibles sur simple demande.

### Distribution

Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

### Fabricant

orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27  
70806 Kornwestheim  
Germany  
[www.orochemie.de](http://www.orochemie.de)  
[info@orochemie.de](mailto:info@orochemie.de)

