




Einlegen der Speicherfolie • Placing of the image plate

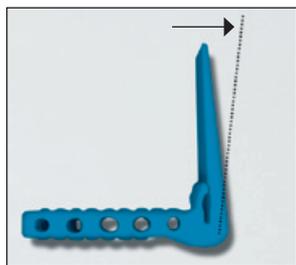

Vor erstmaliger Anwendung Halter aufbiegen
Before first use bend up the bite block

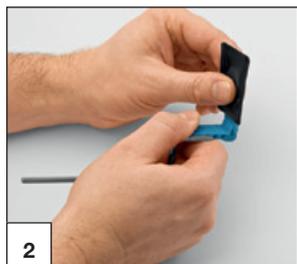

Speicherfolie an Halter anlegen
Apply image plate to bite block

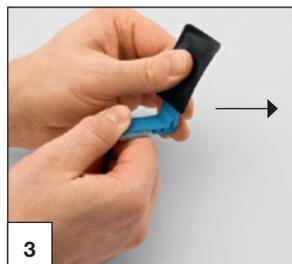

Halter nach hinten aufbiegen
Bend up the bite block gently



Speicherfolie in aufgebogener Halterposition einlegen
Place image plate in the bended bite block

Entnahme der Speicherfolie • Removal of the image plate



Halter mit Speicherfolie nach hinten aufbiegen
Bend up the bite block with attached image plate gently



Speicherfolie in aufgebogener Halterposition entnehmen.
Remove image plate while bending the bite block

