
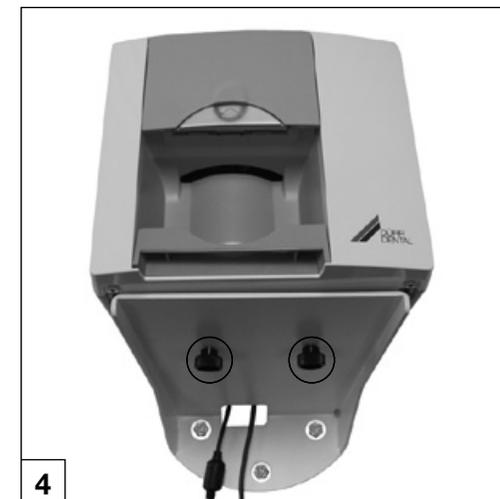
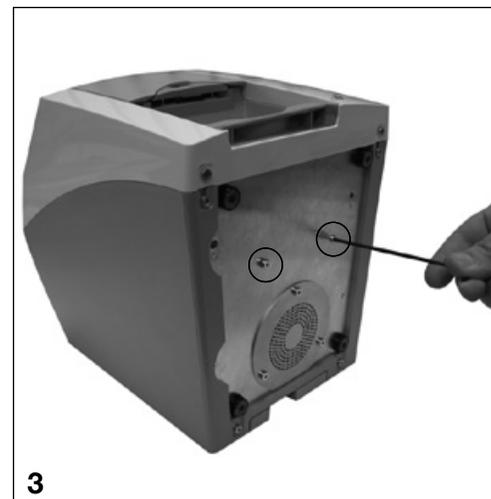
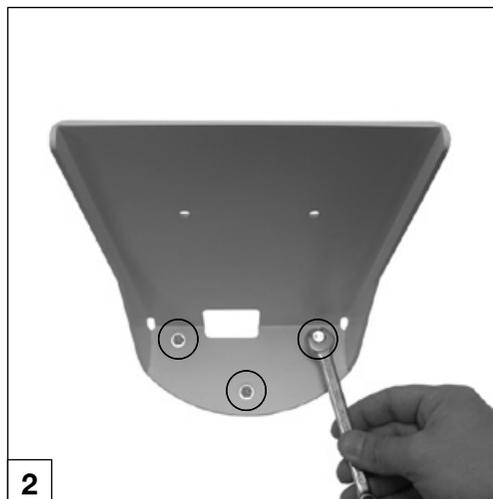


DE Montagehinweis Wandhalterung VistaScan Mini / VistaScan Mini Plus

EN Installation instructions wall mounting bracket VistaScan Mini / VistaScan Mini Plus

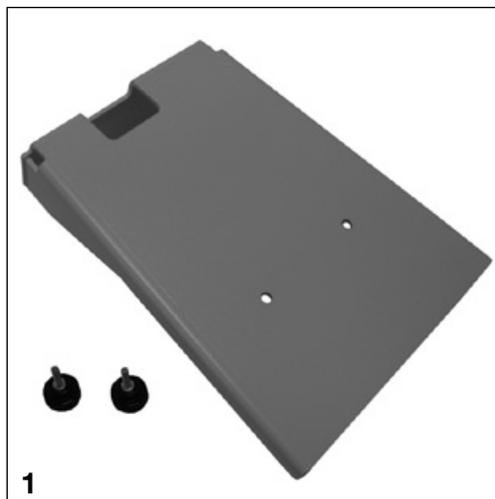

Lieferumfang

Wandhalterung (1x)2141-001-01
Rändelschraube (2x)9000-459-130

Delivery Contents

Wall mounting bracket (1x)2141-001-01
Knurled screw (2x)9000-459-130

- Wandhalterung horizontal ausrichten und mit geeignetem Befestigungsmaterial montieren.
- Place the wall mounting bracket horizontally in position and secure using suitable materials for the surface in question.

- Zwei Schrauben M4x10 (SW 2,5) aus dem Bodenblech des VistaScan Mini entfernen.

i Mit den frei gewordenen Bohrungen wird der VistaScan Mini an der Wandhalterung gesichert.

- Remove the two M4x10 (SW 2.5) screws from the base plate of the VistaScan Mini.

i Use the drill holes now visible to fix the VistaScan Mini securely to the wall mounting bracket.

- Kabel durch die Kabeldurchführung legen.

i Beim Betrieb des Gerätes muss die Abdeckung auf der Rückseite montiert sein.

- VistaScan Mini auf die Wandhalterung setzen und an den Bohrungen ausrichten.

i Die Bohrungen in der Wandhalterung müssen mit den Bohrungen im Bodenblech des VistaScan Mini fluchten.

- VistaScan Mini mit den Rändelschrauben sichern.

- Feed the cable through the cable bushing.

i When operating the appliance the cover must be mounted on the rear side.

- Place the VistaScan Mini onto the wall mounting bracket and locate over the drill holes.

i The drill holes in the wall mounting bracket must be flush with the holes in the base plate of the VistaScan Mini.

- Secure the VistaScan Mini using the knurled thumb screws provided.

DÜRR DENTAL SE

Höpfungheimer Str. 17 · 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Tel: +49 7142 705-0 · Fax: +49 7142 705-500
info@duerrdental.com · www.duerrdental.com

9000-618-162/01



2009/11SE

