


Montieren von drehbaren DürrConnect Teilen / Mount of rotatable DürrConnect parts

Formdichtung für DürrConnect20 (5er Pack) / Seal for DürrConnect20 (pack of 5) . . 9000-404-46E

Dichtring für DürrConnect20 /Seal for rotatable DürrConnect20 parts9000-404-46

Sicherungsring DürrConnect20 drehbar / Clip for rotatable DürrConnect20 parts0700-700-49

Dürr Vaseline9000-474-38

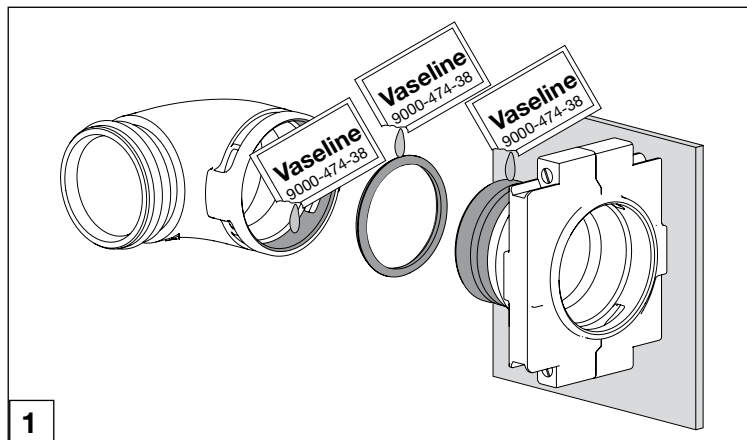


1



Prüfen, ob der Dichtring 9000-404-46 richtig angebracht ist. / Check the right installation position of the seal 9000-404-46.

Dichtring 9000-404-46 1x pro Jahr fetten. / Seal 9000-404-46 must be greases every year.

Dichtring 9000-404-46 alle zwei Jahre austauschen. / Seal 9000-404-46 must be changed every two years.

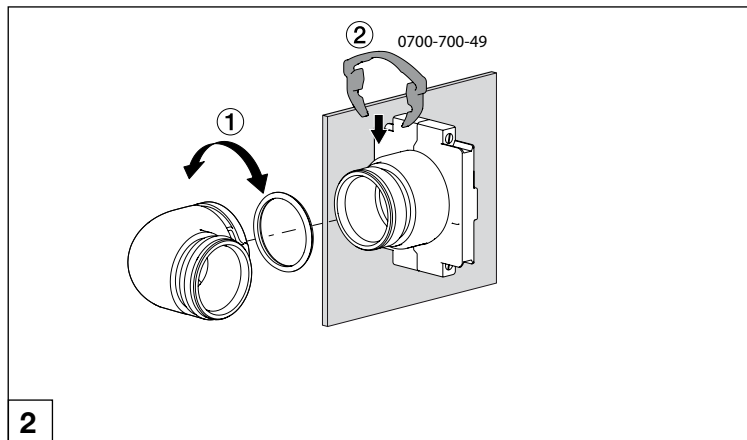

2